



Anwendung des Spucktests

Bitte machen Sie sich mit der in der Packung enthaltenen Anleitung vertraut.

Mindestens **30 Minuten vor dem Test** sollte nichts gegessen und getrunken werden. Auch auf Kaugummis und Nikotin soll verzichtet werden!

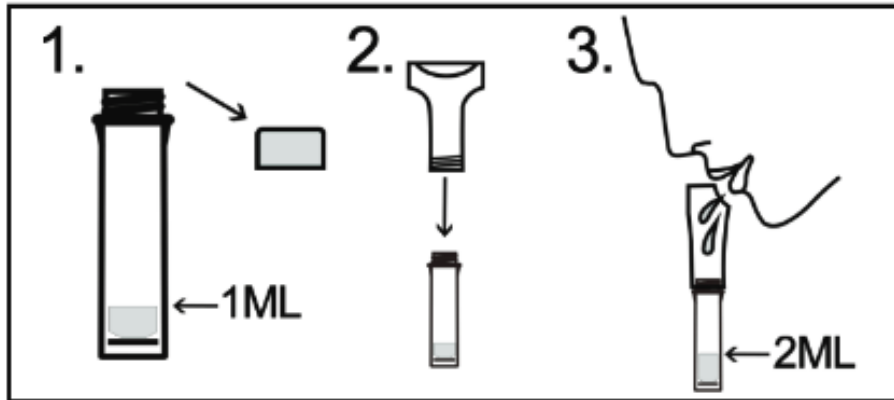

- Deckel vom Flüssigkeitsröhrchen abschrauben und Trichter aufsetzen.
- Räuspfern um Flüssigkeit aus dem Rachenraum zu sammeln.
- In den Trichter spucken.
- Mindestens 10 mal schütteln.
- Flüssigkeit auf die Testkassette tropfen wie gewohnt.

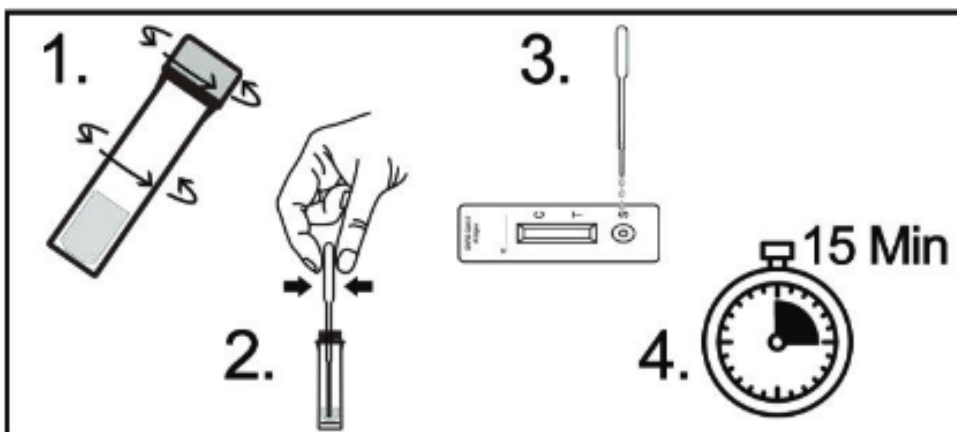

INTERPRETATION DER ERGEBNISSE

