



Anleitung für die Selbsttestung

Xiamen Boson Biotech SARS-CoV-2-Antigen Schnelltest



Was mache ich zuerst?

Nase kräftig schnäuzen
Hände waschen und
ggf. desinfizieren
Testpackung bereitlegen




Wie mache ich was?

Zuerst wird die Testpackung geöffnet!

Innen drin befindet sich:


- ein steril verpackter Tupfer
- ein Plastiktütchen mit einem Extraktionsröhrchen und der Extraktionslösung.
- eine eingeschweißte Testkassette
- eine Gebrauchsanleitung (in Deutsch und Englisch)

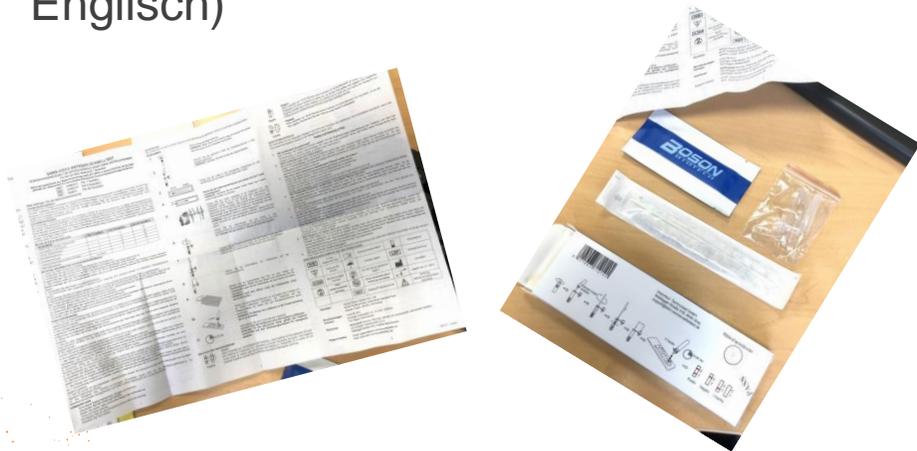

Vorbereitung des Tests



Lege die Packung und alles, was drin ist, vor dich auf einen Tisch.

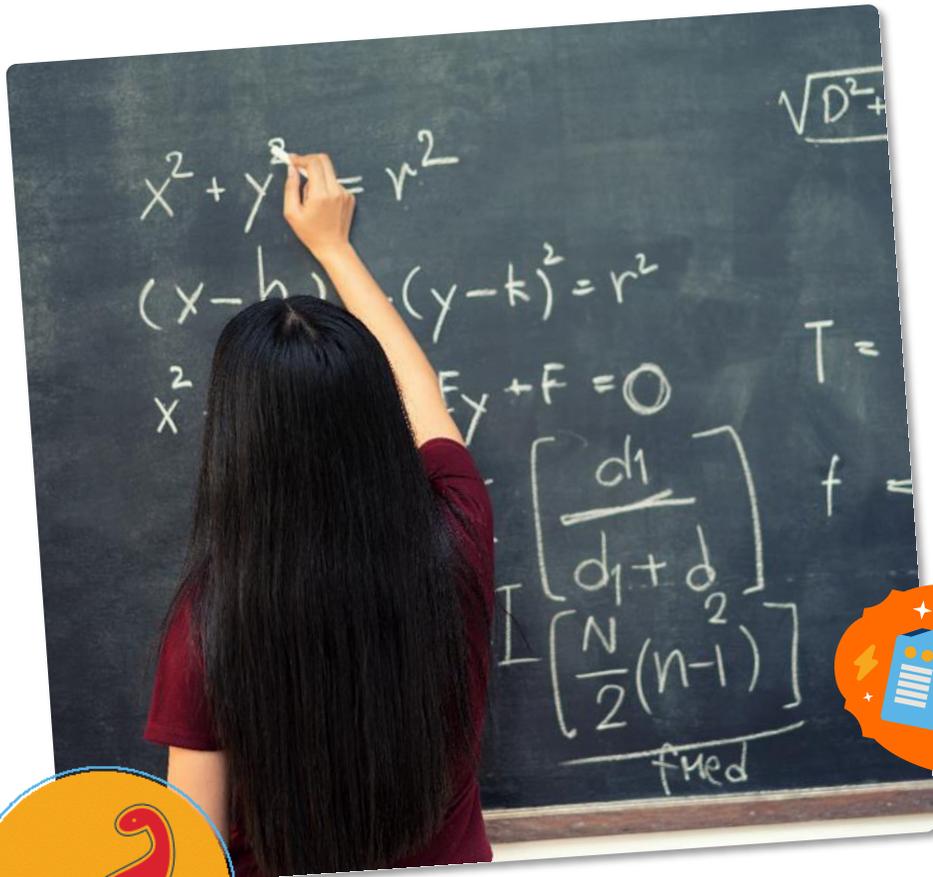

- Drehe die Packung so um, dass du die Rückseite siehst.
- Nimm das dicke Röhrchen aus der durchsichtigen kleinen Tüte und stecke es in den Röhrchenständer in der Rückseite.
- Noch nicht verschließen!
- Öffne die Extraktionslösung und fülle sie in das Röhrchen. Immer noch nicht verschließen!



Der Nasenabstrich

Keine Angst, das ist gar nicht schlimm und tut nicht weh!

1. Öffne die sterile Verpackung des Nasentupfers.
2. Nimm das Stäbchen heraus, berühre aber nicht den Wattetupfer selber.
3. Führe das Stäbchen ca. 2,5 cm in das erste Nasenloch ein. Drehe ihn 3-4 mal an der Nasenschleimhaut.
4. Nun führst du das Stäbchen genauso ins andere Nasenloch ein und drehst wieder 3-4 mal.
5. Führe nun den Abstrichtupfer in das vorbereitete Extraktionsröhrchen ein. Drehe ihn drei bis fünf mal und lasse ihn ca. eine Minute in der Lösung. Du kannst den Timer deines Handys aktivieren.
6. Nun drückst du das Extraktionsröhrchen in der Mitte zusammen und ziehst den Tupfer heraus. Du „wringst“ ihn quasi aus.
7. Jetzt wird das Röhrchen mit dem anhängenden Deckel verschlossen.



Die Testkassette

- Öffne den Beutel um die Testkassette und lege sie vor dich auf den Tisch.
 - Nimm nun das Extraktionsröhrchen und tropfe drei Tropfen in die runde Öffnung auf der Testkassette.
 - Jetzt musst du wieder deinen Timer stellen oder dir die Uhrzeit aufschreiben. Das Ergebnis ist nach 15-20 Minuten sichtbar. **Achtung: Nicht später schauen!! Dann stimmt das Ergebnis nicht mehr!!!**
 - Schau dir dazu die Rückseite der Packung oder die Gebrauchsanweisung noch einmal genau an.
1. Bei dem **Buchstaben C** muss immer eine **Linie** erscheinen (C= Control)! Ist nur diese Linie da, dann ist der Test **NEGATIV**. Du kannst in die Schule. Deine Eltern unterschreiben den Zettel, den du am ersten Abholtag erhalten hast.
 2. Wenn du **zwei Linien** siehst, dann bedeutet die Kombination aus C und T (Testbereich), dass der Test **POSITIV** ist. Informiere dann die Schule. Diese stellt dir eine Bescheinigung für einen kostenlosen PCR Test beim Arzt oder im Testzentrum aus.
 3. Siehst du nur einen Strich bei T oder gar keinen Strich, dann ist der Test ungültig. Benutze ein neues Testkit oder wenn du keins mehr hast, informiere die Schule.





War doch gar nicht
schlimm!

Gemeinsam schaffen
wir das und stemmen
uns gegen das
Virus!!

